

## HAUTE FREQUENCE PORTABLE

### ADVERTISSEMENT

• N'essayez en aucune circonstance d'ouvrir ou d'inspecter les composants internes ou les accessoires de votre appareil. Si une inspection est nécessaire, veuillez contact votre fournisseur ou un technicien qualifié.

• N'utilisez jamais votre appareil dans un lieu humide ou peu ventilé (par exemple, salles de bains); ceci pourrait endommager les composants électriques de votre appareil.

• N'utilisez jamais votre appareil à l'extérieur, une exposition aux éléments naturels pouvant endommager l'appareil.

• Si le cordon d'alimentation était rompu, veuillez demander à un professionnel de le remplacer pour éviter tout dommage, ou demandez conseil à votre revendeur.

### DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Ce produit répond aux exigences suivantes:

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
**1.** Conditions énoncées dans la Directive «Basse tension»: 2006/95/EC

**2.** Conditions énoncées dans la Directive «Compatibilité électromagnétique»: 2004/108/EC

#### RECYCLAGE



Le produit est recyclable.




#### BIENVENUE!

Merci beaucoup d'avoir fait cet achat. Veuillez

lire attentivement les instructions avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.

**2.** Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton «POWER» et assurez-vous que l'option «ENERGY» est réglée sur le minimum.

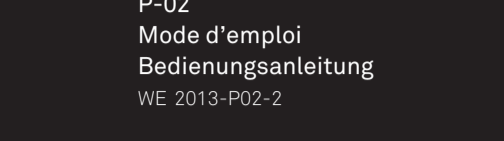

**3.** Touchez la zone de traitement avec l'électrode en verre. Vous pouvez ensuite ajuster doucement l'éjection en réglant l'option «ENERGY».

**4.** Au cours du traitement, veuillez réduire le niveau de rendement au niveau minimal avant tout changement d'électrode, puis ajustez lentement le niveau d'énergie et choisissez l'intensité souhaitée.

**5.** À la fin du traitement, avant de retirer l'électrode du visage du client, veuillez réduire doucement le niveau de rendement au niveau minimal.

### USAGE INDIRECT

**1.** Prenez l'électrode en verre droite et insérez l'extrémité en métal dans le bec de sortie de la poignée.

**2.** Donnez le combiné au client, en vous assurant qu'il touche l'électrode en verre et non le combiné.

**3.** Mettez l'appareil en marche et assurez-vous que le régulateur est réglé au minimum.

**4.** Ajustez lentement l'éjection en réglant le régulateur.

**5.** Effectuez le massage facial ou le traitement. Au cours du traitement, assurez-vous de ne pas toucher ou entrer en contact avec l'électrode de verre qui est tenue par le client.

**6.** À la fin du traitement, réduisez lentement le niveau jusqu'au niveau de rendement minimum puis éteignez l'appareil.



lire les instructions avec attention avant d'utiliser cet appareil. Vous pouvez également demander conseil auprès d'un professionnel afin de vous assurer d'utiliser l'appareil correctement. Nous n'endosserons aucune responsabilité en cas d'accident provoqué par une mauvaise utilisation.


L'entreprise se réserve le droit de modifier les détails des instruments sans préavis. Si vous détectez une erreur dans ces instructions, n'hésitez pas à nous le faire savoir afin d'y apporter une solution.

### CONTENU DE L'EMBALLAGE

• Ces éléments sont sujets à changement sans préavis.

• L'apparence du produit peut différer de l'image.

No.	PRODUIT	RÉF.	QTÉ.
1	ÉLECTRODE 1	10009	1
2	ÉLECTRODE 3	10011	1
3	ÉLECTRODE 4	10012	1
4	ÉLECTRODE SPÉCIAL 3	10026	1
5	POIGNÉE HAUTE FRÉQUENCE	-	1

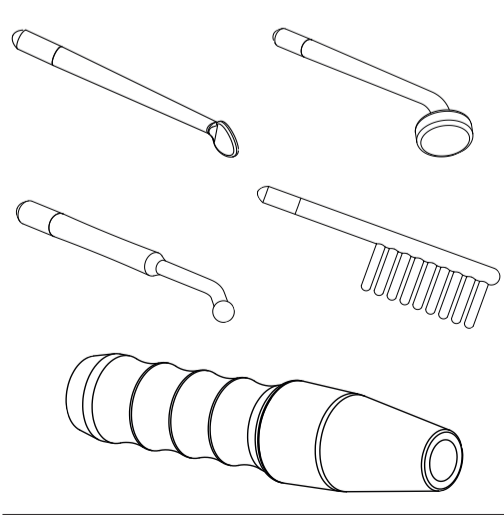


#### MODE D'EMPLOI

**1.** Choisissez le tuyau d'électrode en verre adapté

et insérez l'extrémité en métal dans la partie de rendement du manche (veuillez à ne pas toucher l'électrode de verre avec vos mains ou tout autre objet en métal).

**2.** Allumez l'appareil en appuyant sur le bouton «POWER» et assurez-vous que l'option «ENERGY» est réglée sur le minimum.

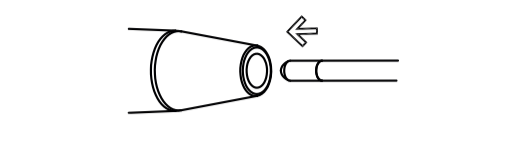

**3.** Touchez la zone de traitement avec l'électrode en verre. Vous pouvez ensuite ajuster doucement l'éjection en réglant l'option «ENERGY».

**4.** Au cours du traitement, veuillez réduire le niveau de rendement au niveau minimal avant tout changement d'électrode, puis ajustez lentement le niveau d'énergie et choisissez l'intensité souhaitée.

**5.** À la fin du traitement, avant de retirer l'électrode du visage du client, veuillez réduire doucement le niveau de rendement au niveau minimal.

### USAGE INDIRECT

**1.** Prenez l'électrode en verre droite et insérez l'extrémité en métal dans le bec de sortie de la poignée.


**2.** Donnez le combiné au client, en vous assurant qu'il touche l'électrode en verre et non le combiné.

**3.** Mettez l'appareil en marche et assurez-vous que le régulateur est réglé au minimum.

**4.** Ajustez lentement l'éjection en réglant le régulateur.

**5.** Effectuez le massage facial ou le traitement. Au cours du traitement, assurez-vous de ne pas toucher ou entrer en contact avec l'électrode de verre qui est tenue par le client.

**6.** À la fin du traitement, réduisez lentement le niveau jusqu'au niveau de rendement minimum puis éteignez l'appareil.

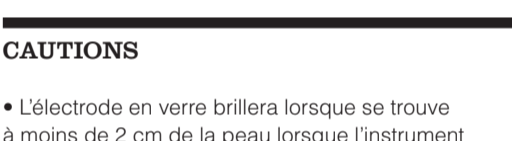

### CAUTIONS

• L'électrode en verre brillera lorsque se trouve à moins de 2 cm de la peau lorsque l'instrument est allumé.

Poids et tailles	Taille de l'emballage (cm)	32,5x21x6
	Poids brut (kg)	0,8
	Dimensions produit (mm)	23xØ4,5

Caractéristiques de travail	Puissance de travail	650.000 GHz
Caractéristiques électriques	Tension nominalel	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz

## DEUTSCH

#### WARNUNG

• Versuchen Sie niemals das Gerät zu öffnen und die innen liegenden Komponenten oder Zubehör zu untersuchen. Wenn eine Kontrolle notwendig wird, setzen Sie sich dafür mit Ihrem Lieferanten oder einem kompetenten Techniker in Verbindung.

• Verwenden Sie das Gerät niemals in feuchter oder unbelüfteter Umgebung, wie z.B. Feuchträume oder Badezimmer, um Schaden an den elektrischen Komponenten Ihres Geräts zu vermeiden.

• Verwenden Sie das Gerät niemals im Freien, Witterungseinflüsse können Schäden verursachen.

• Wenn die elektrische Zuleitung beschädigt ist, lassen Sie diese von einem Fachmann kontrollieren und austauschen, um Risiken zu vermeiden, oder bitten Sie den Händler um Kundendienstleistungen.

### EC-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Dieses Produkt erfüllt die folgenden Anforderungen:

est allumé. Dans ce cas, réduisez l'énergie de l'appareil à haute fréquence. Si le client sent toujours l'étincelle, il peut se couvrir le visage avec une petite serviette en coton mais jamais avec une serviette en nylon ou synthétique.

• Avant de retirer l'électrode de verre de la peau, réduisez l'option «ENERGY» à son minimum puis éteignez l'appareil avant de le retirer de la peau.

• Les clients ne peuvent pas porter d'objets en métal ou de bijoux ; tous les objets doivent être retirés avant de commencer le traitement.

• Les femmes enceintes ou les personnes ayant un pacemaker (ou tout appareil électrique ou de régulation des battements du cœur) ne peuvent pas être soumis à des traitements à haute fréquence.

• Les produits utilisés lors d'un traitement à haute fréquence ne doivent contenir ni alcool ni substance à base d'alcool afin d'empêcher toute combustion accidentelle.

• Ne touchez jamais l'intérieur de l'œil avec une électrode à haute fréquence.

• Veuillez à ne toucher que la poignée du combiné à haute fréquence.

### MAINTENANCE

• Les tuyaux d'électrode en verre doivent être gardés propres et secs, et doivent être stérilisés avant et après chaque utilisation.

### ACCESSOIRES

RÉFÉRENCE	DESCRIPTION
10009	ÉLECTRODE 1
10010	ÉLECTRODE 2
10011	ÉLECTRODE 3
10012	ÉLECTRODE 4
10024	ÉLECTRODE SPÉCIAL 1
10025	ÉLECTRODE SPÉCIAL 2
10026	ÉLECTRODE SPÉCIAL 3

Vous trouverez plus d'information sur le site: [www.weelko.com](http://www.weelko.com)



Poids et tailles	Taille de l'emballage (cm)	32,5x21x6
	Poids brut (kg)	0,8
	Dimensions produit (mm)	23xØ4,5

Caractéristiques de travail	Puissance de travail	650.000 GHz
Caractéristiques électriques	Tension nominalel	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz

Caractéristiques de travail	Puissance de travail	650.000 GHz
Caractéristiques électriques	Tension nominalel	220V ~ 240V
	Fréquence	50Hz/60Hz

## ENGLISH

**1.** Die Vorschriften der Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EC

**2.** Die Vorschriften der Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit: 2004/108/EC

### RECYCLING

Dieses Symbol auf unseren elektrischen Geräten und auf ihren Verpackungen bedeutet, dass diese Produkte in Europa nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Für die Entsorgung beachten Sie bitte die lokalen Vorschriften oder die Anforderungen für die Entsorgung von elektrischen Geräten. Diese Initiative zur Entsorgung von Elektromüll hilft die natürlichen Ressourcen zu erhalten und dient einem besseren Umweltschutz.

#### WILLKOMMEN!

Vielen Dank für Ihren Kauf! Bitte lesen Sie die Anleitungen gründlich durch, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Sie können auch Ihren Fachbetrieb um eine Einweisung bitten, damit Sie sicher sind, dass Sie das Gerät richtig einsetzen. Wir haften nicht

für Unfälle, die aufgrund fehlerhafter Bedienung entstehen.


Der Hersteller behält sich technische Änderungen der Geräte ohne vorherige Ankündigung vor. Wenn Sie in diesen Anleitungen Fehler finden, bitte senden Sie uns eine E-Mail, damit wir diese berichtigen können.

### PACKUNGSINHALT

• Diese Komponenten können jederzeit ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

• Das Aussehen des Produkts kann von den Abbildungen abweichen.


Nr.	PRODUCT	REF.	QTY.
1	ELEKTRODE 1	10009	1
2	ELEKTRODE 3	10011	1
3	ELEKTRODE 4	10012	1
4	ELEKTRODE SPEZIAL 3	10026	1
5	HANDSTÜCK	-	1

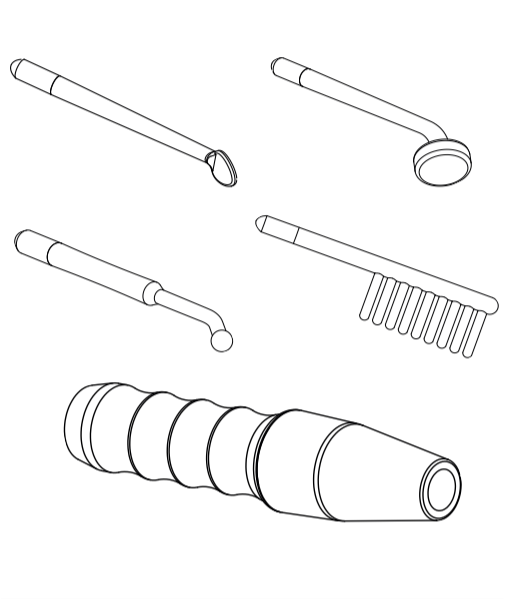

### GEBRAUCHS

**1.** Schließen Sie das Netzteil.

**2.** Wählen Sie die richtige Glaselektrode und setzen Sie den Metallaufsatz in die Öffnung des Handgriffs ein (Berühren Sie die Glaselektrode nicht mit Ihren Händen oder Metallgegenständen!).

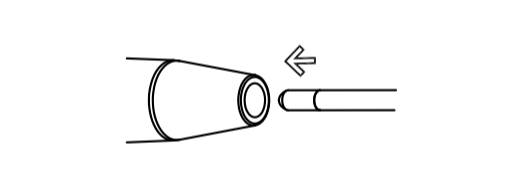

**3.** Das Gerät mit dem "POWER"-Taster einschalten und sicherstellen, dass "ENERGY" auf den Minimalwert eingestellt ist.

**4.** Berühren Sie die Behandlungsfläche mit der Glaselektrode. Sie können dann die Ausgangsleistung langsam mit Hilfe von "ENERGY" anpassen.

**5.** Wenn während der Behandlung Elektroden ausgetauscht werden, stellen Sie den Ausgangspegel auf den Minimalwert vor dem Elektrodentausch , anschließend stellen Sie das Energieniveau langsam wieder bis zur geforderten Stärke ein.

**6.** Nach der Behandlung verringern Sie den Pegel langsam bis zur Minimalausgangsleistung, bevor Sie die Elektroden vom Gesicht des Kunden entfernen.

#### INDIREKTE VERWENDUNG

**1.** Wählen Sie die gerade Glaselektrode

### TECHNISCHE DATEN

Gewicht und Abmessungen	Verpackungsgröße (cm)	32,5x21x6
	Bruttogewicht (kg)	0,8
	Produktabmessungen (mm)	23xØ4,5

Technische Daten	Arbeitsleistung	650.000 GHz
Elektrische Daten	Nennspannung	220V ~ 240V
	Frequenz	50Hz/60Hz

und stecken Sie den Metallaufsatz in die Öffnung des Handgriffs ein.

**2.** Geben Sie dem Kunden den Handapparat und stellen Sie sicher, dass er die Glaselektrode und nicht den Handapparat hält.

**3.** Schalten Sie das Gerät an und vergewissern Sie sich, dass der Regler auf dem Mindestwert steht.

**4.** Stellen Sie nun mit Hilfe des Reglers langsam die Ausgangsleistung ein.

**5.** Führen Sie die Gesichtsmassage oder Behandlung durch. Stellen Sie während des gesamten Behandlungsprozesses sicher, dass Sie die vom Kunden gehaltene Glaselektrode nicht berühren bzw. in Kontakt mit ihr geraten.

**6.** Verringern Sie zum Abschluss der Behandlung langsam den Pegel auf den Mindestausgangswert und schalten Sie das Gerät anschließend aus.

### VORSICHT

• Der Pol der Glaselektrode gibt Funken ab, wenn das eingeschaltete Gerät einen Abstand von weniger als 2,5 cm von der Haut hat. Verringern Sie die Energie des Hochfrequenzgeräts. Wenn der Kunde die Funken immer noch spürt, können Sie das Gesicht mit einem kleinen trockenen Baumwolltuch abdecken, nie mit einem Tuch aus Nylon oder Synthetikmaterial.

• Bevor Sie die Glaselektrode von der Haut nehmen, verringern Sie "ENERGY" auf den eingestellten Minimalwert, schalten Sie dann aus, bevor Sie das Gerät von der Haut entfernen.

• Die Kunden dürfen keine Metallgegenstände oder Schmuck tragen. Solche Gegenstände müssen vor jeder Behandlung abgenommen werden.

• Hochfrequenzbehandlungen sollten nicht an Schwangeren oder Personen mit Herzschrittmachern (oder einem anderen elektrischen oder rhythmischen Gerät zur Regulierung) vorgenommen werden.

• Produkte, die mit Hochfrequenzbehandlungen verwendet werden, dürfen keinen Alkohol oder alkoholhaltige Substanzen enthalten, um eine versehentliche Verbrennung durch Lichtbogenbildung zu vermeiden.

• Berühren Sie niemals den Bereich des inneren Auges (Augapfel) mit irgendeiner Hochfrequenzelektrode.

• Halten Sie den Handstück immer auf der Plastikseite.

### WARTUNG

• Die Rohre der Glaselektrode müssen sauber und trocken gehalten werden und sind vor und nach jedem Gebrauch zu sterilisieren.

### ZUBEHÖR

REF.	BESCHREIBUNG
10009	ELEKTRODE 1
10010	ELEKTRODE 2
10011	ELEKTRODE 3
10012	ELECTRODO 4
10024	ELEKTRODE SPEZIAL 1
10025	ELEKTRODE SPEZIAL 2
10026	ELEKTRODE SPEZIAL 3

Besuchen Sie unsere Webseite für weitere Informationen [www.weelko.com](http://www.weelko.com)